

Montageanleitung für die genuS Beinstütze

Zuerst sind die Unterarmgehstützen auf die richtige Höhe einzustellen. Dabei sollen die Schultern nicht hochgezogen sein, sondern ganz normal und unverkrampft auf dem Rumpf hängen. Die Handgriffe der Gehstützen sind dabei auf die Höhe einzustellen, in der sich die Hände bei runterhängenden Armen befinden. Sehen Sie hierzu die nebenstehenden Bilder als Beispiel.




Die Beinstütze wird nun am besten auf einen Tisch gelegt mit den Anschraub - Ausbuchtungen nach oben. In diese wird die Gehstütze eingelegt und LOSE vormontiert. Dabei ist darauf zu achten, daß sich das Stützenrohr immer noch zum Anpassen der richtigen Höhe verschieben läßt. Da die Beinstütze sich entweder nur für das linke oder das rechte Bein verwenden läßt, achten Sie bitte darauf, daß Sie die für Sie richtigen Anschraubausbuchtungen auswählen. Das 2. Bild zeigt die Montage der Kniestütze an der Gehstütze, die abgeschnittene Seite zeigt nach vorne.



Die Polsterung für den Oberschenkelstumpf ist von einem Orthopädie - techniker individuell anzufertigen.

Nun stellt man sich hin, und schiebt die Beinstütze auf dem Stützenrohr bis an den Stumpf des amputierten Beines heran. Die Beinstütze sollte dabei etwa einen Finger breit niedriger als mit dem hängenden Stumpf in der Schale gefühlt eingestellt werden. Dieser Vorgang ist mit Hilfe einer 2. Person leichter durchzuführen. Zuletzt montiert man dann die Führungslasche, sie bedingt eine bessere Balance.

Nun sind die Schrauben fest anzuziehen. Es ist darauf zu achten, daß die untere Anschraubschelle dabei nicht OBERHALB des Endes vom Einschubrohr der Gehstütze angeschraubt wird, sondern IMMER in einem Bereich, in dem sich beide Rohre der Stütze übereinander befinden.

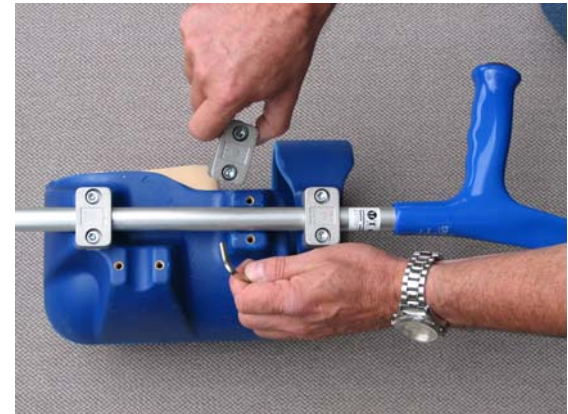

Für Orthopädie - Techniker:

Die unteren Bilder zeigen die Modifikation der genuS Kniestütze als Beinstütze für den Oberschenkelstumpf. Falls nicht bereits geschnitten bestellt, ist hierzu ist aus der Kniestütze eine entsprechende Lasche abzuschneiden und als Führungslasche mit einer 3. Schelle an die Stützkrücke zu schrauben. Außerdem muß ein entsprechendes Polster für den Stumpf individuell

für den Patient angepasst werden.

Bitte halten Sie hierzu Rücksprache mit uns. Links sehen Sie ein Beispiel, wie die Polsterung für den Stumpf aussehen kann, hier für das linke Bein.

Rechts sehen Sie den Lieferumfang der Beinstütze mit 3 Anschraubschellen und 6 Inbus - Schrauben. Die Abbildung zeigt die Beinstütze für das rechte Bein.

Die abgeschnittene Seite muß immer nach vornezeigen.



Die Polsterung gehört nicht zum Lieferumfang.

